

Det du ser.
 Det du hører.
 Det du gjør.

Meldinger som du kan se på LCD-displayet:

Tekstmeldinger
 Støtteller
 Medgått tid
 EKG-kurve

start her

Person kollapser - mistanke om hjertestans.
 Enhet OK.
 Slå på enheten.
 Selvtest; enhet OK.

Andre meldinger du kan høre:

Koble til kabel.
 Enhet mislyktes.
 Slipp støt-knappen.
 Bytt batterier.
 (n) strømsstøt gitt.

Gjør følgende:

Fest elektrodekabel.
 Slå enheten av og deretter på.
 Hvis enheten fremdeles ikke fungerer, utfører du HLR.
 Slipp støt-knappen.
 Bytt ut alle de 10 batteriene.

Indikatorlys blinker.
 Start HLR.
 Administrer HLR: 2 åndedrett for hver 30. kompresjon.

Enhet som er utstyrt for behandling av voksne og barn.

2

30

Etter ett støt...

Indikatorlys blinker.
 Støt anbefalt. Ikke rør pasienten. Trykk på blinkende sjokknapp.
 Gi **HOLD AVSTAND**-advarsel. **IKKE** rør pasienten! Trykk på -knappen.
 Sjokk gitt.

Etter 2 minutter med HLR...
 Stopp HLR.

Støt ikke anbefalt.

Indikatorlys blinker.
 Ring etter hjelp.
 Ring eller send noen etter hjelp.

Indikatorlys blinker.
 Åpne luftvei.
 Snu pasienten over på ryggen, og åpne deretter luftveiene ved å vippe på hodet og løfte på haken. Legg hånden på pasientens panne, og bøy forsiktig hodet bakover. Plasser fingertuppene under hakespissen til pasienten, og løft opp haken for å åpne luftveiene.
 Alternativ: Plasser det passive luftveistøttesystemet (PASS - Passive Airway Support System) under skuldrene for å bøye hodet bakover. IKKE bruk PASS hvis du har mistanke om hode- eller nakkeskade.

Hvis pasienten ikke responderer, åpne luftveiene.

Indikatorlys blinker.
 Undersøk pust.

Undersøk pusten.
 Se etter om brystet beveger seg. Lytt etter pustelyder fra pasientens munn. Kjenn om det kommer luft på kinnet ditt. Finn ut om pusten er normal, ikke normal eller fraværende.

Indikatorlys blinker.
 Fest defibrilleringselektroder til pasientens bare bryst.
 Fest elektroder for voksne eller spedbarn/barn til pasientens bare bryst. Følg instruksjonene for elektrodepakken.

Fest elektrodene som vist på pasienter under 8 år eller 25 kg.

Indikatorlys blinker.
 Ikke rørpasienten. Analyse utføres.

INDIKASJONER FOR BRUK

Bruk når en pasient har en åpenbar sirkulasjonssvikt indikert av:

- Bevisstløshet
- Manglende normal pusting
- Manglende puls eller tegn på sirkulasjon.

Hvis pasienten er under 8 år eller veier under 25 kg, skal ZOLL AED Plus brukes med ZOLL AED Plus barneelektroder. Behandlingen bør ikke utsettes for å bestemme pasientens nøyaktige alder eller vekt.

KONTRAINDIKASJONER FOR BRUK

IKKE bruk når en pasient:

- Er ved bevissthet
- Puster
- Har en merkbar puls eller andre tegn på sirkulasjon.

TILSIKTET BRUKER

ZOLL AED Plus ekstern defibrillator skal brukes av personell som er kvalifisert via opplæring i bruk av AED Plus og grunnleggende førstehjelp, avansert hjerte-lunge-redning, eller annen legeautorisert akuttmedisinsk utrykning til defibrillering av personer med hjertestans. HLR-overvåkningsfunksjonen omfatter en metronom utformet for å oppfordre redningspersonell til å utføre hjertekompresjoner ved den ERC-anbefalte frekvensen på 100-120 kompresjoner per minutt. Talemeldinger og visuelle meldinger oppfordrer til en kompresjonsdybde på 5 - 6 cm for voksne pasienter. HLR-overvåkningsfunksjonen er ikke beregnet for bruk på pasienter under 8 år.

ZOLL

ZOLL Medical Corporation

269 Mill Road
 Chelmsford, MA 01824-4105
 +1 978-421-9655
 www.zoll.com